
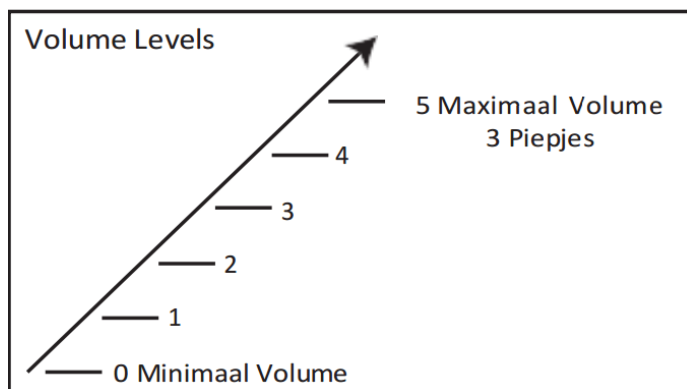


Met het nieuwe toestel kunt u ook kiezen tussen volume niveaus!

Druk op het drukknopje en laat meteen weer los om het volume te versterken.

U hoort drie piepjes wanneer u de maximale volume-instelling hebt bereikt, drukt u nog een keer dan gaat het toestel weer naar de laagste instelling.

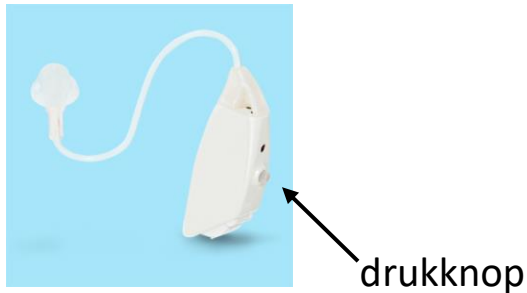

Als u 2 seconden het drukknopje ingedrukt houdt, verandert het toestel van programma,

Programma 1 = versterking

Programma 2 = meer versterking met ruisonderdrukking

Programma 3 = nog meer versterking en meer ruisonderdrukking voor het filteren van lage tonen.